



## ***Agulha para Sutura Odontológica com Fio de Ácido Poliglicólico 100%***

### **Indicação:**

A Agulha para Sutura Odontológica com Fio de Ácido Poliglicólico 100% é indicada para suturar superfícies gengivais após procedimento cirúrgico. Por se tratar de um fio de sutura absorvível, não é necessária a remoção do mesmo.

### **Cuidados Especiais:**

Por se tratar de um fio de sutura absorvível, não se recomenda sua utilização onde seja necessária a aproximação de tecidos sob tensão. Produto de uso único. Destruir após o uso. Não utilizar se a embalagem estiver violada.

### **Advertência e Precauções:**

A Agulha para Sutura Odontológica com Fio de Ácido Poliglicólico 100% deverá ser utilizada somente por profissionais habilitados.

### **Especificações, Características Técnicas do Produto e Precauções:**

A Agulha para Sutura Odontológica com Fio de Ácido Poliglicólico 100% é fabricada em aço inoxidável 304 (Norma ASTM F 899-02), na forma triangular, comprimento de 1,5 cm, com ângulo de 180° (½ círculo) encastada a um fio de ácido poliglicólico, tingido de violeta, com comprimento de 45 cm e com os números cirúrgicos de 3,0,4,0, 5,0 e 6,0. O produto é estéril (esterilizado por óxido de etileno). O fio é absorvido através de um processo de hidrólise. A absorção se inicia com uma perda da força tênsil do fio, seguida por perda de massa.

### **Armazenagem:**

Armazenar em temperatura ambiente.

### **Composição:**

Agulha de aço inoxidável 304 e fio de ácido poliglicólico.

### **Apresentação:**

Acondicionada individualmente em envelopes contendo um conjunto de agulha e fio de ácido poliglicólico esterilizado. Caixa contendo 24 unidades.

### **Prazo de Validade:** 3 anos após a data de fabricação.



## ***Agulha para Sutura Odontológica com Fio de Ácido Poliglicólico 100%***

### **ATENÇÃO:**

- ESTÉRIL
- Esterilizado por Óxido de Etileno.
- Produto de uso único.
- Não utilizar se a embalagem estiver violada.
- Uso profissional.
- Conservar em temperatura ambiente.



**Fabricante: Technew Com. Ind. Ltda**  
C.N.P.J.: 31.258.478/0001-40  
Registro: ANVISA 80015520004  
Resp.Téc: Claudia B. R. Vidigal  
CRO-RJ: 24678

Indústria Brasileira



**SAC**  
sac@technew.ind.br  
Fone: 55 (21) 3296 - 4763